

NÁVOD K POUŽITÍ

GASTRO LÍMEC PRO KOČKY

SPECIFIKACE VÝROBKU:

GASTRO LÍMEC je určený kočičím pacientům, u nichž je potřeba zavést jícnovou sondu. Tento límec je praktickým a dlouhodobým pomocníkem při ošetřování zvířete. "

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Vyberte vhodnou velikost dle níže uvedené tabulky:

TABULKA ROZMĚRŮ gastro límce kočky			
velikost	S	M	L
obvod krku (cm) *	21-23	24-26	27-29

* límec lze prodloužit pomocí nastavitelného proužku až o 5 cm

2. Připevněte límec zvířeti:

Uchopte límec a prostrčte kanylu vytvořeným otvorem (A). Kanylu dále zajistíte poutkem na suchý zip (B). Límec nasadíte zvířeti na krk, a to rubovou stranou opatřenou bavlnou a zajistíte suchým zipem (C). Zbytek kanyly stočte a upevněte do kapsičky (D). V případě potřeby lze límec prodloužit pomocí přídatného proužku, který je součástí balení.



MATERIÁL A ÚDRŽBA:

Límec je opatřený bavlnou a kočárkovinou, která je snadno omyvatelná a odolná proti zadrápnutí. V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem. Při větším znečištění perte v ruce s použitím jemného prostředku. Nepoužívejte sušičku.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte zvíře bez dozoru, za kvalitu výrobku si stojíme, jako výrobce však neneseme zodpovědnost za použití límce, ani za jakoukoliv případnou újmu zvířete, zakoupením a používáním výrobku toto berete na vědomí a vyjadřujete souhlas. Náš límec je skvělý pomocník, ale nic – žádný límec na světě – nevynahradí zvířeti pozornost a ostražitost majitele, kterou k uzdravení potřebuje.

